SALUSmask^{Au}



Sistema BIOCIDA di PROTEZIONE delle VIE RESPIRATORIE indicato sia per l'utilizzo in ambienti chiusi (come mezzi pubblici, centri commerciali, centri estetici ecc. e/o ambienti di lavoro come bar, officine, laboratori, ecc.) che per l'utilizzo all'aperto, per le proprietà di:

- 1) PROTEZIONE dai droplet virali (dell'influenza stagionale, COVID19, ecc.)
- 2) PROTEZIONE dagli agenti patogeni (come virus, funghi, batteri, ecc.)
- 3) PROTEZIONE dall'inquinamento ATMOSFERICO delle POLVERI SOTTILI aerodisperse (come SMOG, PM10, ecc.)
- 4) PROTEZIONE contro **aerosol** di particelle da 0,3 µm 5,3 con **FILTRAZIONE ANTIBATTERICA** (BFE)
- 5) PROTEZIONE dagli **agenti chimici allergizzanti** (come i residui volatili rilasciati dai prodotti per la pulizia degli ambienti oppure quelli rilasciati da strumenti di lavoro come solventi, lubrificanti, tinture, lozioni, schiume, ecc.)
- 6) PROTEZIONE dagli **agenti biologici allergizzanti** (di origine vegetale o animale, come batteri, germi, muffe, acari, ecc.)
- 7) PROTEZIONE dai **pollini allergeni aerodispersi** (come la Parietaria, le Graminacee, ecc.)

INFORMAZIONI e NOTE UTILIZZO:

- 1) **Al primo utilizzo, lavare a mano** l'interno della mascherina (da rovescio) con detersivo bucato (es. sapone marsiglia) e risciacquare accuratamente.
- 2) Dopo aver disposto la mascherina sul viso, SAGOMARE il NASELLO (inserito nel bordo superiore) e REGOLARE la lunghezza dei LACCETTI LATERALI per FAR COMBACIARE completamente la mascherina a NASO, ZIGOMI e COLLO fino ad ottenere una perfetta adesione al viso.
- N.B. Effettuata la regolazione è possibile tagliare la parte di laccetto in eccesso.
- 3) In presenza di **epidemie**, dopo **ogni utilizzo** disinfettare sia le MANI che il tessuto esterno con ALCOOL denaturato/GEL igienizzante o con detersivi.
- 4) In qualsiasi situazione di utilizzo, dopo **max 10 ore** di utilizzo complessivo, lavare la mascherina a mano come sopra descritto.
- 5) Questa mascherina **PROTEGGE** per oltre **10 ore** di utilizzo anche **continuato** ed essendo **LAVABILE** più di **30 VOLTE** consente di **UTILIZZARLA** oltre **300 ORE.**

SCHEDA TECNICA e CERTIFICAZIONI ALL'INTERNO

DISPOSITIVI PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE

SFLUSIONA SILVI

distribuiti da: FABE ITALY srl

Via Beppino Smania, 1 - 35129 PADOVA







SALUSmask

MASCHERINA LAVABILE & 4 STRATI

realizzata con tessuti conformi alle normative sia delle CHIRURGICHE che delle FFP2, ma con in più proprietà BIOCIDE e LACCETTI REGOLABILI

◆ PROTEGGE dall'INQUINAMENTO ATMOSFERICO e/o dalle
CONTAMINAZIONI degli AGENTI sia PATOGENI* che ALLERGIZZANTI

misura

L/XL

- ♦ DIFENDE le VIE RESPIRATORIE per oltre 10 ore (anche) continuative
- ♦ LAVABILE più di 30 VOLTE per cui RIUTILIZZABILE per oltre 300 ore (* virus, funghi, batteri)
 - ✓ Esterno (A) IDRO-REPELLENTE in MICYON (EVO-TEX) tessuto tecnico con funzione di SCHERMO anti-droplet virali
- ✓ Interno (B+C) in MICRO-FILAMENTI **evolon**®(FREUDENBERG) **DOPPIA BARRIERA** protettiva con funzione di
- ◆ filtrazione BATTERICA (germi, batteri, ecc.)
- ◆ filtrazione PARTICOLATO (smog, pm10, ecc.)
- ◆ filtrazione ALLERGENI (pollini, muffe, ecc.)
- ✓ Fodera (**D**) in MicroPP+FibraArgento **Solution** (**EVO-TEX**) con funzione **BATTERICIDA e VIRUCIDA** per la disinfezione dell'aria respirata e contrasto a reazioni allergiche o irritazioni cutanee.
- ✓ <u>L'attività BIOCIDA dei tessuti realizzati con Filati in ARGENTO</u> è certificata dalla normativa internazionale UNI EN ISO 20645
- ✓ Le proprietà di FILTRAZIONE BATTERICA e protezione AEROSOL delle particelle da 0,3 μm 5,3 dell'**evolon**[®]MicroFilament Textile (FREUDENBERG) sono certificate dalla normativa internazionale UNI EN 14683

